


# SwabCap®

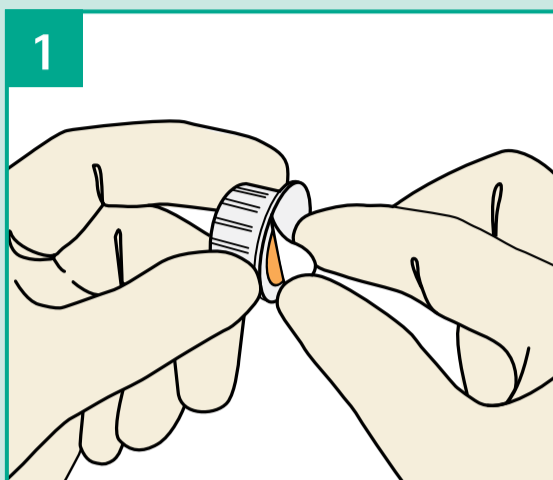


1

## Sejměte ochrannou folii

Dodržujte aseptické podmínky v souladu s doporučeními výrobce v návodu pro použití.


Odstraňte ochrannou folii tahem za jazýček. Uzávěr **SwabCap®** nevyjímejte z bílého plastového držáku.

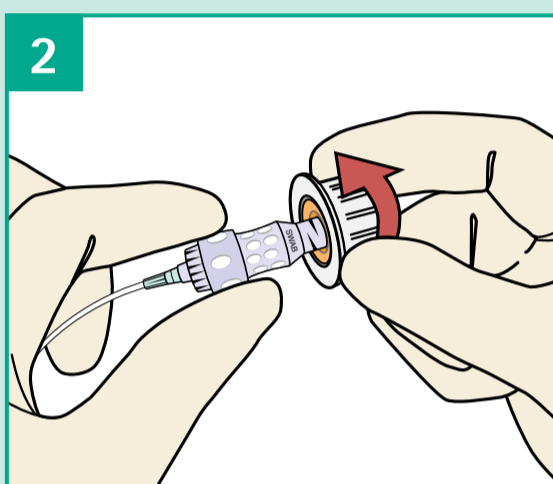

2

## Přitlačte a otáčejte


Jednou rukou podržte otíratelný bezjehlový ventil, druhou pak uzávěr **SwabCap®** přitiskněte a našroubujte ve směru hodinových ručiček na ventil.

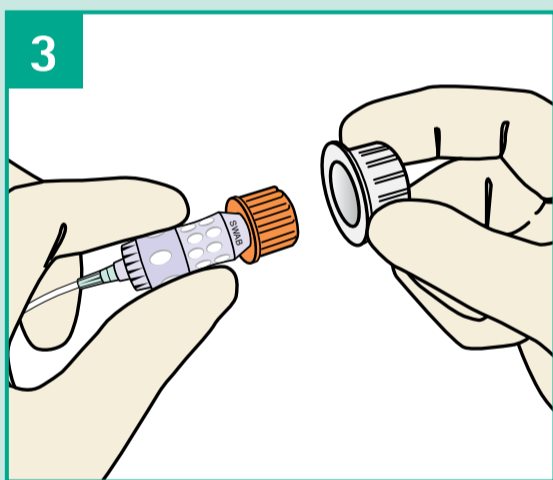

3

## Chraňte

Poté, co **SwabCap®** našroubujete na své místo, opatrně odstraňte bílý plastový držák z otíratelného bezjehlového ventilu.

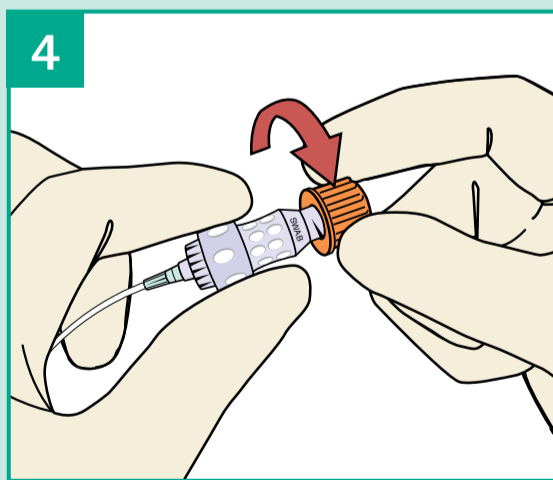

4

## Odstranění uzávěru a přístup k ventilu

K odstranění uzávěru je třeba použít obě ruce, abychom měli jistotu, že nedošlo k neúmyslnému uvolnění ventilu. Uchopte ventil a **SwabCap®** otočte proti směru hodinových ručiček, sejměte jej a zlikvidujte.

**URČENO K JEDNORÁZOVÉMU POUŽITÍ.**

Přesvědčte se, že je ventil bezpečně připojen ke katétru. Poté je ventil připraven k použití.

Po sejmutí uzávěru **SwabCap®** již není třeba vstup před použitím dezinfikovat.



Uzávěr bezjehlového ventilu typu Luer se 70% izopropylalkoholem k dezinfekci.

Určen pro otíratelné bezjehlové ventily jako dezinfekční čistící prostředek před vstupem do katétru a jako fyzická ochrana před kontaminací v době mezi přístupy do katétru.

**SwabCap vydezinfikuje ventil za 5 minut od aplikace, a pokud není odstraněn, udržuje dezinfikovaný povrch ventilu po dobu až 7 dní.**

### Výhody pro Vás

- Zjednodušená a standardizovaná technika dezinfekce zkracuje dobu ošetření
- Snazší dodržování standardů dezinfekce

### Výhody pro Vaše pacienty

- Pasivní kontinuální dezinfekce povrchu ventilu a závitů
- Ochrana před kontaminací dotykem a infekcí šířenou vzduchem
- Dodržování dezinfekčních postupů je viditelné a měřitelné

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE